

Версия: 0 Ревизия: 3 – Дата на последна версия: 27/02/2025

ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА - МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ ПАМУЧНА ВАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларация за съответствие, издадена в съответствие с изискванията на действащото законодателство на европейска територия, може да бъде предоставена при поискване.

ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Име на фирмата: Turati Idrofilo S.p.A.
 Адрес на фирмата 1° Maggio, 242 – 10062 – Luserna San Giovanni (TO)
 ДДС номер: 07243840019
 Тел.: +39-0121-955501
 Имейл: info@cottonplus.it
 Уебсайт: www.turati-idrofilo.com и www.cottonplus.it

ОТОРИЗИРАНА ПОМОЩ

За техническа помощ относно продукта можете да се свържете с производителя, като използвате един от посочените по-горе данни за контакт. Техническа помощ относно продукта може и трябва да се извършва само от Turati Idrofilo S.p.A.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИСТОВКАТА

Тази листовка съдържа инструкции относно употребата на абсорбиращ памук като помощно средство при ежедневните превързочни дейности, което не влиза в контакт с увредена кожа или лигавица.

Тази листовка е предназначена за лицето, отговорно за употребата и съхранението на медицинското изделие и е свързана с продукта.

Тази листовка съдържа защитена с патент информация и не може да бъде дори частично възпроизвеждана за каквато и да е употреба и под каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на производителя.

Turati Idrofilo S.p.A. декларира, че информацията, съдържаща се в тази листовка, е в съответствие с техническите и безопасни спецификации на медицинското изделие, за което се отнася листовката. Вярно копие на тази листовка се съдържа в техническото досие на изделието, което се съхранява в Turati Idrofilo S.p.A.

Turati Idrofilo S.p.A. не признава никаква документация, която не е била изготвена, издадена или разпространена от самата компания или от неин упълномощен представител.

СИМВОЛИ

Освен тук посочените символи, могат да се добавят и други.

	СЕ маркировка		Да се пази сухо. Пазете медицинското изделие от влага и атмосферни влияния.
	Производител		Да се пази от слънчева светлина
	Номер на партида		Нестерилно
	медицинско изделие		Срок на годност
	Да не се използва повторно		

ОПИСАНИЕ НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ

Артикули с различни размери и тегло, изработени от 100% абсорбиращ памук, кардирани и/или обработени с вода в съответствие с Европейската фармакопея.

Препоръчително е да прочетете внимателно тази листовка, преди да използвате медицинското изделие.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал: 100% памук

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Неинвазивно изделие за употреба като помощно средство при ежедневни превързочни дейности, което не е в контакт с увредена кожа или лигавица.

УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Не е предвидена друга употреба, освен описаната в параграф „ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“.

Абсолютно забранено е също:

- Употреба от лица, алергични към памук.
- Употреба от деца.
- Употреба от лица с ограничени когнитивни способности.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ

- Абсорбиращият памук не лекува никакви заболявания.
- Медицинското изделие може да се използва само веднъж, тъй като е за еднократна употреба.

ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ.

- Абсолютно е забранено да се правят каквито и да е модификации по медицинското изделие. Всяка повреда, произтичаща от употребата изделие, което е неправилно модифициране от неупълномощен оператор, освобождава производителя от всякаква отговорност.
- Пазете внимателно това ръководство, което е необходимо за правилната и безопасна употреба на медицинското изделие.
- Ако опаковката има дефекти, които биха могли да замърсят устройството и да го направят неизползваемо, препоръчваме да информирате търговеца на дребно.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

В инструкцията за употреба не са посочени странични ефекти. Не прилагайте продукта върху кожата, ако има отворена рана или раздразнение.

В случай на раздразнение, причинено от продукта, незабавно спрете приложението и се консултирайте с лекар, за да проверите за алергия към памук.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Медицинското изделие може да причини дразнене при хора, които са особено чувствителни или алергични към памучен материал.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте медицинското изделие на хладно и сухо място, далеч от атмосферни влияния и парни струи.
- Съхранявайте медицинското изделие далеч от източници на топлина, открит пламък и пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте медицинското изделие, преди употреба, в оригиналната му опаковка.

УПОТРЕБА

- Дезинфекцирайте ръцете си, като ги измиете обилно със сапун и вода преди употреба.
- Вземете памучен тампон и ако е необходимо го потопете в дезинфектант и/или подобни вещества.
- Внимателно третирайте засегнатата част от тялото.
- За еднократна употреба
- Нестерилно

ВНИМАНИЕ

- ДА СЕ ИЗБЯГВА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА
- ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪРХУ НАРАНЕНА КОЖА ИЛИ ЛИГАВИЦИ.
- ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА

ВЪЗРАСТОВА ГРАНИЦА ЗА УПОТРЕБА ПРИ ДЕЦА

Медицинското изделие може да се използва при деца на нула и повече години.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

След употреба памукът трябва да се изхвърли в общия контейнер за отпадъци.

Ако в памука има следи от замърсяващи и/или потенциално опасни материали и/или вещества, изхвърлете го в контейнера за биологично опасни специални отпадъци.

Пластмасовите опаковки (LDPE4) могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране на пластмаса.

Проверете местните разпоредби за изхвърляне.

Не разпръсквайте и не оставяйте продукта и опаковката в околната среда по каквато и да е причина. Никога не давайте опаковката на деца (лица под 14-годишна възраст).